

Etherena TCU380A Be Free

**De betrouwbare TCU380A
koperspiraal in een handig
plaatsingsmechanisme**



**Opgenomen in de
NHG standaard anticonceptie**

Uniek mechanisme

Plaatsing van een koperspiraal is nog nooit zo
makkelijk geweest!



MML | Medical

Your strategic partner in medical devices

Etherena TCu380A Be Free


Plaatsing van een koperspiraal is nog nooit zo makkelijk geweest. Ervaar het zelf met de Etherena TCu380A Be Free.

- o Bevat de bekende en vertrouwde TCu380A koperspiraal
- o Meest toegepaste type koperspiraal ter wereld
- o Zeer eenvoudige plaatsing, ook voor de minder geoefende plaatser
- o Met 1 hand uit te voeren
- o Push-Pull No Touch insertiemechanisme
- o Gebogen vorm voor de perfecte plaatsing
- o Plaatsingsgarantie
- o Werkingsduur 10 jaar



De T zit in positie om geladen te worden. Geen direct contact nodig met de T om deze te laden in de inbrenghuls.


De licht gebogen vorm van de Etherena volgt de vorm van het lichaam voor een accurate plaatsing.

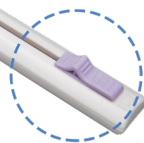

Simpele beweging van de knop maakt plaatsen eenvoudiger. Duwen voor laden en instellen diepte, terugtrekken voor plaatsing.


Uniek mechanisme

Eenvoud bij het inbrengen. Met die gedachte is de gepatenteerde Etherena ontwikkeld. Met 1 hand te bedienen. De andere hand vrij voor de aanhaaktang. Beweeg de knop naar voren voor het laden en instellen van de diepte. Breng de ingestelde inbrenghuls in. Haal de knop terug voor plaatsing van de spiraal. Eenvoudig en intuïtief!

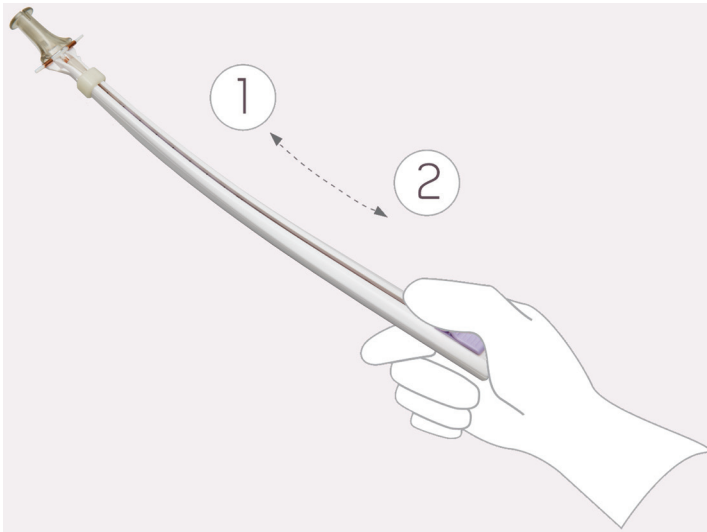

Eenvoudige plaatsing in slechts 2 stappen.

Kijk op www.etherena.nl voor de instructiefilm!

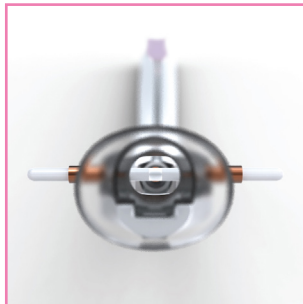

Specificaties

De **Etherena TCU380A** koperspiraal bevat de “oude” vertrouwde TCU380A koperspiraal. Gemaakt volgens specificaties van de WHO. Dit type koperspiraal is het meest voorgeschreven spiraal ter wereld. Al tientallen jaren op de markt. Het is dus GÉÉN nieuwe introductie van een nieuwe koperspiraal. **WEL** heeft de Etherena een handig gepatenteerd inbrengmechanisme. Maakt het plaatsen van een koperspiraal eenvoudig! Ook voor de minder geoefende plaatser.

Specificaties Etherena TCU380A Be Free

Naam	Etherena TCU380A Be Free
Horizontale arm lengte (mm)	32
Verticale stam lengte (mm)	36
Totaal actief koperoppervlak	380 mm ²
Materiaal spiraalframe	LDPE met bariumsulfaat (radiopaque)
ZI nummer	16936221

Ga voor meer informatie inclusief instructiefilm naar:
www.etherena.nl



MML | Medical

Your strategic partner in medical devices